

## MASCARILLA PROTECTOR M1 R

OEDIM, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, hace un esfuerzo en la producción de material de protección en el combate contra el virus, creando la mascarilla Protector M1 R, la cual ofrece protección efectiva y comodidad, gracias a su diseño de media máscara moldeada.



### CARACTERÍSTICAS

- Normativa: EN 0065:2020
- Diseño: moldeado mono casco que cubre nariz, boca y mentón.
- Método de sujeción: goma elástica de alta calidad libre de látex.
- Embalaje higiénico: protege la mascarilla de cualquier contaminación antes de su uso.
- Almacenaje: Conservar en lugar fresco y libre de humedad.
- Compatible: con otros equipos de protección (gafas, auditivos...)
- Reutilizable: Lavable en dilución 1:50 de lejía y agua.

### REQUISITOS EN BASE A LA NORMA EN 14683:2019 + AC:2019\*

	Tipo I	Tipo II	Tipo IIR	Resultados
Eficacia filtración bacteriana (BFE)%	≥95	≥98	≥98	98.34
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2)	<40	<40	<60	62
Presión de resistencia a salpicaduras (kPa)	No requerido	No requerido	≥16.0	17

\*\*La mascarilla PROTECTOR M1 R supera los requerimientos de la normativa UNE EN 14683:2019+AC:2019, mascarillas quirúrgicas del tipo IIR Premium, OEDIM las comercializa bajo la norma EN 0065:2020.

## 1. Uso de la mascarilla

### 1.1 GENERALIDADES

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

NOTA Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación:



*Instrucciones de colocación de la mascarilla*

## 1.2 COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:



Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



Identificar la parte superior de la mascarilla y colocarla mascarilla en la cara.



Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas.



Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y verificar que la mascarilla cubre la barbilla.



Verificar que la mascarilla está bien colocada. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.



No tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocarla, lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

## 1.3 RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

**1:** Quitarse los guantes de protección. **2:** Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica **3:** Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla. **4:** Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico como se describe en el apartado 2.1. **5:** Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

## 2. Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados de debe desechar.

### 2.1 PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA

Las mascarillas, tras ser reutilizadas, se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, véase la figura 2.1). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.



Figura 2.1

### 2.2. LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA

Se debe realizar un lavado sumergiendo la mascarilla en una dilución 1:50 de lejía y agua fría durante 30 minutos. El artículo deberá secarse de manera natural durante 24 horas.

## 3. Duración de uso máximo recomendado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 24 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda lavarla según las indicaciones del apartado 2.2.

Durante el mismo período de 24 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones (véase capítulo 1), se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones (véase apartado 1.2).

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

