

Pantalla protectora facial

ClickPrinting, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, hace un esfuerzo en la producción de material de protección en el combate contra el virus, creando la pantalla protectora facial, una solución idónea para empleados y trabajadores altamente expuestos a la interacción directa con otras personas.

Compuesta de visor + banda de sujeción

Las pantallas de protección están fabricadas en España



Anti empañamiento
Banda de espuma




Sujeción anatómica
Tecnología de confort



- Diseño patentado
- Automontable (10 segundos)
- Pantallas de protección para proyección de líquidos
- Preparada y diseñada para facilitar la circulación de aire y evitar empañamiento
- Apta para utilizar incluso con otros sistemas de protección como mascarillas, gafas, etc.
- Espuma suave con la piel (facilita la absorción del sudor)
- Cubre totalmente la cara
- Gran ángulo de visión
- Su diseño permite trabajar cómodamente
- Pantalla reutilizable



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

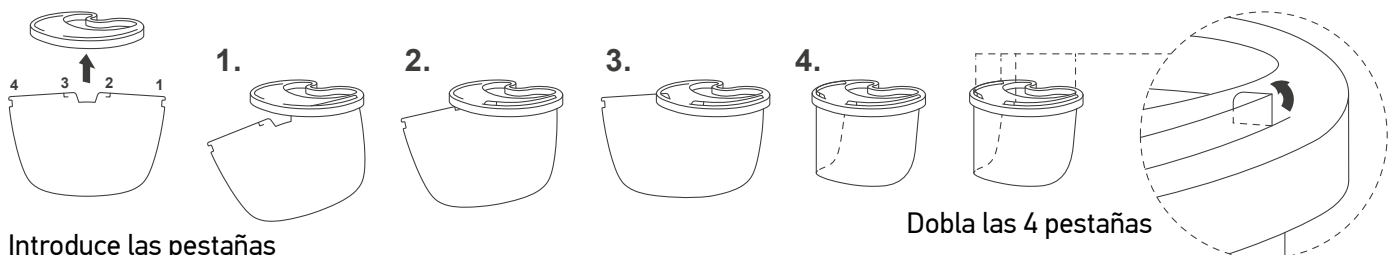

Introduce las pestañas
en el siguiente orden

Dobla las 4 pestañas

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **PANTALLA:** Ligera, cómoda y segura.
- Apta para la protección contra partículas y salpicaduras de líquidos.
- Medida: 356 mm x 235 mm Peso: 65 g
- PET/PVC transparente de 200 micras de espesor.
- Material sostenible, puede ser totalmente reciclado.
- Certificado normas: DIRECTIVE 2003/89/EC of November 2003 amending Directive 2000/13/EC (Allergenic substances).
- Se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en Europa (Reglamento CE nº 1907/2006 Reach) y a nivel internacional.
- **BANDA DE SUJECCIÓN:** Material transpirable y suave con la piel y que ayuda a evitar la sudoración. Espuma de poliuretano de celda abierta de 15 mm.
- Se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en Europa (Reglamento CE nº 1907/2006 Reach) y a nivel internacional.

Ficha Técnica	Normativa	UNE-EN166:2002
Clase óptica	Empañamiento	N
Clase óptica	Uso medio	2
Resistencia mecánica	Mínima	
Campo protección	Proyección de líquidos	3

RECOMENDACIONES Y LIMPIEZA

- No es un producto intercambiable, utilizar siempre la misma persona.
- Desinfectar después de cada uso.
- Material lavable con solución jabonosa, alcohol o alcohol rebajado.
- No emplear productos químicos disolventes o geles.